

Guida di consultazione rapida dell'analizzatore IDEXX VetLab UA


Analisi di un campione

1. Avviare l'analisi del campione sulla IDEXX VetLab* Station (per maggiori informazioni, vedere la *Guida per l'operatore della IDEXX VetLab Station*).
2. Dopo aver confermato le informazioni sul paziente nella schermata Seleziona strumenti, selezionare l'icona **Analizzatore UA**, e l'icona UA manuale se desiderato, quindi toccare **Esegui**.
3. Verificare che il LED in corrispondenza della spia di accensione dell' UA sia di colore verde lampeggiante per accertarsi che le informazioni del paziente siano state inserite correttamente.
4. Apporre il campione sulla striscia di analisi IDEXX UA (non utilizzare strisce di altre marche) in questo modo:
 - a. Utilizzare urina fresca che non sia stata centrifugata. Mescolare a fondo il campione di urina. Il campione deve essere a temperatura ambiente quando viene eseguita l'analisi e analizzato entro 1 ora se conservato a temperatura ambiente.
 - b. Utilizzare una pipetta per bagnare la striscia con il campione di urina, accertandosi che tutti i tamponi di analisi siano inumiditi. Non piegare la striscia.




Nota: non è consigliabile immergere la striscia nel contenitore di urina, poiché la striscia potrebbe piegarsi, determinando la comparsa di errori durante l'analisi.

- c. Picchiettare brevemente (1-2 secondi) il bordo più lungo ed il retro della striscia di analisi su una superficie assorbente (ad esempio, un tovagliolo di carta).

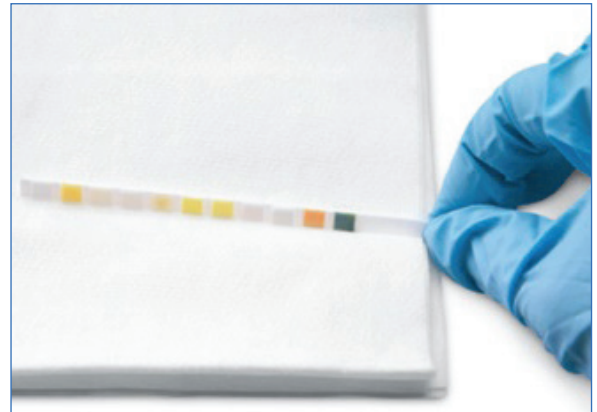

5. Collocare subito la striscia di analisi sul carrello portastrisce, facendo in modo che i tamponi del test siano rivolti verso l'alto e che il bordo anteriore della striscia sia tenuto fermamente dal morsetto nello slot di inserimento. La barra di blocco deve essere aperta.

Morsetto

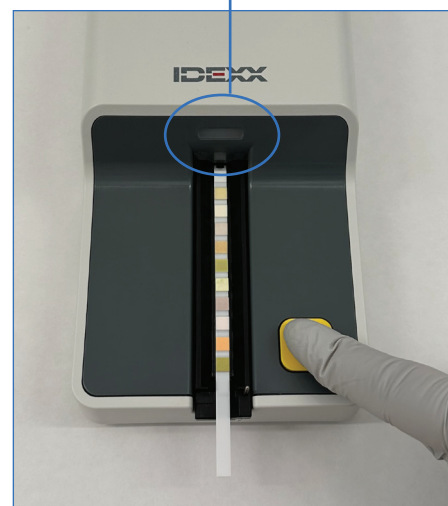

6. Premere il pulsante **Avvio**. Il carrello avanza leggermente e la barra di blocco si chiude.
7. Al termine dell'analisi, rimuovere e smaltire la striscia di analisi. Rimuovere eventuali residui di urina passando un fazzoletto privo di sfilacciate.

Pulizia del carrello portastrisce

Pulire quotidianamente il carrello portastrisce per evitare accumulo di urina che può causare il malfunzionamento del dispositivo.

1. Nella IDEXX VetLab Station, sulla schermata Strumenti, selezionare **Spegnere l'analizzatore UA**.
2. Estrarre il carrello portastrisce dall'analizzatore.
3. Sciacquare sotto acqua corrente le parti contaminate del carrello portastrisce e (se necessario) pulirlo con alcol isopropilico al 70%.

Piccoli depositi cristallini, soprattutto quelli che contaminano il meccanismo della barra di blocco o gli ingranaggi sul lato inferiore del portastrisce, possono essere rimossi con una spazzola morbida. Asciugare il portastrisce con un panno senza pelucchi.



Importante: fare attenzione a non danneggiare il tampone di riferimento grigio durante la pulizia e assicurarsi che sia completamente pulito, correttamente alloggiato e asciutto prima di effettuare la lettura di una striscia di analisi.

4. Con la barra di blocco rivolta verso di sé, far scorrere il carrello nello slot situato sotto il LED della spia di stato, in modo che il bordo del carrello sia allineato con il bordo dell'analizzatore.
5. Accendere l'analizzatore UA premendo il pulsante di accensione posto sul lato destro. Il controllo si avvia automaticamente e verifica che il tampone di riferimento sia in buone condizioni. In caso contrario, verrà visualizzata una notifica su IDEXX VetLab* Station.

Calibrazione dell'analizzatore

L'analizzatore IDEXX VetLab* UA* deve essere ricalibrato ogni 7 giorni.

1. Accertarsi che il carrello portastrisce sia pulito e asciutto.
2. Dalla schermata iniziale di IDEXX VetLab Station, premere l'icona **Analizzatore UA** (o premere **Strumenti** e quindi toccare **Analizzatore UA**).
3. Premere **Calibrazione**, quindi toccare **Effettua calibrazione**.
4. Quando il LED della spia di stato diventa verde lampeggiante, collocare sul carrello portastrisce una nuova striscia di calibrazione IDEXX VetLab* UA*, in modo che i tamponi di analisi siano rivolti verso l'alto e che il suo margine superiore sia inserito nel morsetto posto all'estremità dello slot di inserimento. La barra di blocco deve essere aperta.
5. Premere il pulsante **Avvio**.

Importante:

- + Prestare attenzione a non toccare i tamponi di analisi sulla striscia di calibrazione e non lasciare che vengano a contatto con l'urina o con altri liquidi.
- + Solo le strisce di calibrazione IDEXX VetLab UA possono essere utilizzate con l'analizzatore IDEXX VetLab UA.

Il carrello avanza leggermente, la barra di blocco si chiude e l'analizzatore legge sia il tampone di riferimento grigio che i tamponi di calibrazione. Il carrello ritorna alla sua posizione iniziale e la levetta della striscia si apre.

Il risultato della calibrazione viene visualizzato su IDEXX VetLab Station, con l'indicazione di esito positivo o negativo. Se il processo di calibrazione non va a buon fine, consultare il *Manuale d'uso dell'analizzatore IDEXX VetLab UA* per informazioni sulla risoluzione dei problemi o chiamare il Supporto tecnico e assistenza clienti IDEXX.

6. Rimuovere e smaltire la striscia di calibrazione. Utilizzare le strisce di calibrazione una sola volta.

Supporto tecnico e assistenza clienti IDEXX

Austria 43 (0)1 206 092 729 • Italia 39 02 87 10 36 76 • Germania 49 (0)69 153 253 290
Lussemburgo 352 (0)34 20 80 87 22 • Svizzera 41 (0)44 511 22 37