

Test SNAP Feline Triple

Accuratezza del test

Sensibilità e specificità del test SNAP* Feline Triple*

Analita	Metodo di riferimento	Risultato test SNAP		Totale	Sensibilità (LC al 95%)
		+	-		Specificità (LC al 95%)
Filariosi ¹	+	37	4	256	90,2% (76,9%-97,3%)
	-	0	215		100% (98,3%-100%)
FeLV ²	+	158	0	407	100% (97,7%-100%)
	-	2	247		99,2% (97,1-99,9%)
FIV ³	+	95	0	279	100% (96,2%-100%)
	-	4	180		97,8% (95,4%-99,4%)

Fonte: Dati in archivio presso IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.

Metodo di riferimento

1. Test PetChek* Heartworm PF Antigen
2. Test PetChek* Feline Leukemia Virus Antigen
3. FIV Western blot

Per l'interpretazione e gli algoritmi diagnostici, visitare [idexx.com/FelineTripleResources](https://www.idexx.com/FelineTripleResources).