

Analizzatore biochimico Catalyst Dx*

Registro QC/Manutenzione

L'analizzatore Catalyst Dx* esegue un controllo automatico ad ogni accensione, durante l'esecuzione di un test e alla sua inizializzazione.

Annuale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Mensile	Pulire i componenti interni dell'analizzatore.												
	Esegui il controllo qualità utilizzando Catalyst* SmartQC* Control.												
	Pulire la centrifuga.												
	Svuotare il cassetto dei rifiuti.												
Trimestrale	Pulire il filtro della ventola.												
Quando viene richiesto	Pulire i componenti interni dell'analizzatore.												
Se necessario	Pulire la struttura esterna.												
	Pulire lo schermo.												
	Svuotare il cassetto dei rifiuti.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore Catalyst Dx, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore biochimico IDEXX Catalyst Dx* all'indirizzo idexx.com/product-info.



IDEXX

Analizzatore biochimico Catalyst One*

Registro QC/Manutenzione

L'analizzatore Catalyst One* esegue un controllo automatico ad ogni accensione, durante l'esecuzione di un test e alla sua inizializzazione.

Annuale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Mensile	Pulire i componenti interni dell'analizzatore.												
	Esegui il controllo qualità utilizzando Catalyst* SmartQC* Control.												
	Svuotare il cassetto dei rifiuti.												
Quando viene richiesto	Pulire i componenti interni dell'analizzatore.												
Se necessario	Pulire la struttura esterna.												
	Svuotare il cassetto dei rifiuti.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore Catalyst One, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore biochimico IDEXX Catalyst One* all'indirizzo idexx.com/product-info.



IDEXX

Analizzatore Coag Dx*

Registro QC/Manutenzione

L'analizzatore Coag Dx* esegue un controllo automatico ad ogni accensione, quando si esegue un test e allo svolgimento di un controllo di qualità elettronico, quotidianamente.

Mensile: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quando necessario	Pulire il tastierino, La struttura esterna e lo schermo.																															

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore Coag Dx, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore Coag Dx* all'indirizzo idexx.com/product-info.



Analizzatore cellulare IDEXX inVue Dx*

Registro QC/Manutenzione

Mensile: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Settimanale	Riavvia l'analizzatore una volta alla settimana.																															
Quando necessario	Pulire il supporto cartuccia.																															
	Pulire la struttura esterna.																															

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore cellulare IDEXX inVue Dx, si prega di consultare il manuale d'uso all'indirizzo idexx.com/product-info.



Analizzatore ematologico IDEXX LaserCyte*

Registro QC/Manutenzione

L'analizzatore LaserCyte è un sistema a base liquida che deve essere collegato all'alimentazione per eseguire il ciclo di pulizia. Se l'analizzatore LaserCyte rimane spento per oltre 24 ore consecutive, contattare l'Assistenza Clienti IDEXX.

Trimestrale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12
Settimanale	Pulire il filtro dell'aria.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore LaserCyte, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore ematologico LaserCyte* all'indirizzo idexx.com/product-info.



Analizzatore ematologico IDEXX ProCyte Dx*

Registro QC/Manutenzione

Mensile: _____

L'analizzatore eseguirà un controllo in sottodiondo durante il riavvio, dopo l'uscita dalla modalità Standby. Per uscire dalla modalità Standby sono necessari circa 8 minuti.

Per impostazione predefinita, l'analizzatore ProCyte Dx è impostato per passare in modalità Standby ogni giorno alle 7:00 pm. Per modificare l'impostazione predefinita, consultare la Guida per l'operatore o rivolgersi all'Assistenza clienti e tecnica IDEXX.

Per spegnere l'analizzatore, selezionare l'opzione **Spegnere ProCyte Dx** dalla schermata Strumenti dell'analizzatore ProCyte Dx e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando si accendono l'IPU e l'analizzatore ProCyte Dx, accendere prima la IDEXX VetLab Station.

Pulire il filtro della ventola mentre l'analizzatore è spento per il riavvio settimanale.

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quando necessario	Sostituire il kit dei reagenti.																															
	Sostituire la confezione dei coloranti.																															
Settimanale	Spegnere l'analizzatore e l'IPU.																															

Annuale: _____

Per la procedura di lavaggio mensile, è necessario preparare una soluzione di candeggina al 5%, diluendo candeggina non profumata filtrata con acqua distillata/deionizzata. Il rapporto tra candeggina e acqua dipende dalla concentrazione della candeggina (ad esempio, la candeggina concentrata Clorox* ha una concentrazione del 7,5%, quindi la soluzione deve essere composta da 2 parti di candeggina con 1 parte di acqua deionizzata/distillata).

Adottare le tecniche di manipolazione di laboratorio appropriate quando si esegue il controllo di qualità e-CHECK* (XS).

Frequenza	Manutenzione necessaria	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Mensile	Pulire il filtro della ventola.												
	Eseguire la procedura di lavaggio mensile (quando ne viene fatta richiesta dalla IDEXX VetLab Station).												
	Eseguire il controllo di qualità e-CHECK (XS) L2.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore ProCyte Dx, consultare il manuale d'uso dell'analizzatore ematologico IDEXX ProCyte Dx all'indirizzo idexx.com/product-info.



Analizzatore ematologico ProCyte One*

Registro QC/Manutenzione

Mensile: _____

L'analizzatore ematologico ProCyte One* esegue automaticamente la maggior parte della manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro. Il sistema esegue una sequenza di autopulizia dopo ciascun prelievo di campioni e compie un ciclo giornaliero del fluido al di fuori del normale orario di lavoro. La domenica alle 3.00 viene eseguita una sequenza di manutenzione settimanale più robusta, che comprende controlli del sistema, lavaggi e un'esecuzione automatica del controllo IDEXX SmartQC*. IDEXX invierà occasionalmente aggiornamenti software al sistema ProCyte One. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente per l'installazione degli aggiornamenti.

IMPORTANTE: Il sistema ProCyte One deve rimanere acceso per ricevere gli aggiornamenti software e per consentire l'esecuzione dei cicli di manutenzione automatica. L'analizzatore accede alla modalità a basso consumo dopo 15 minuti di inattività e si riavvia periodicamente, se necessario, durante la manutenzione settimanale.

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quando necessario	Sostituire il reagente.																															
Quando necessario	Sostituire il reagente leucoprotettivo.																															
Quando necessario	Sostituire il controllo IDEXX SmartQC*.																															

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per maggiori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore ProCyte One, consultare la Guida per l'operatore dell'analizzatore ematologico ProCyte One all'indirizzo [idexx.com/product-info](https://www.idexx.com/product-info).



presenta l'analizzatore di sedimenti urinari SediVue Dx*
Registro QC/Manutenzione

Mensile: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quando necessario	Svuotare il raccoglitore scarti.																															
Settimanale	Riavviare l'analizzatore.																															

Annuale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Mensile	Pulire l'analizzatore.												
	Pulire il filtro della ventola.												
	Analisi: controllo qualità L1 e L2.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per maggiori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore SediVue Dx, consultare il *Manuale d'uso dell'analizzatore di sedimenti urinari SediVue Dx* IDEXX all'indirizzo idexx.com/product-info.



Analizzatore SNAP Pro*

Registro QC/Manutenzione

Mensile: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Settimanale	Spegnere il dispositivo.																															
Settimanale/ Quando necessario	Pulire la base, i riflettori e l'attivatore.																															

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per maggiori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore SNAP Pro, consultare la Guida per l'operatore dell'analizzatore SNAP all'indirizzo [idexx.com/product-info](https://www.idexx.com/product-info).



Analizzatore SNAPshot Dx*

Registro QC/Manutenzione

L'analizzatore SNAPshot Dx esegue automaticamente la calibrazione.
All'inizio di ogni test, l'analizzatore esegue un controllo automatico e, a ogni accensione, esegue un controllo automatico del sistema.

Annuale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Quando necessario	Pulire la struttura esterna.												
	Pulire le porte dell'analizzatore SNAP*.												
	Pulire lo schermo.												
	Pulire i pozzetti dell'incubatore.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore SNAPshot Dx, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore SNAPshot Dx* all'indirizzo idexx.com/product-info.



IDEXX VetLab* Station

Registro QC/Manutenzione

Trimestrale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12
Settimanale	Effettuare il backup dei dati.												
	Riavviare il computer.												

Aggiornamento software (come fornito)

Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:	Numero della nuova versione:
Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:	Data di caricamento:

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della IDEXX VetLab Station, consultare il *manuale d'uso della IDEXX VetLab Station* all'indirizzo idexx.com/product-info.



Analizzatore IDEXX VetLab* UA*

Registro QC/Manutenzione

Mensile: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giornaliera	A fine giornata, pulire l'alloggiamento† della striscia di analisi con acqua e, se necessario, alcol isopropilico al 70%.																															
Settimanale	Calibrare l'analizzatore ogni sette giorni.																															

***IMPORTANTE:** Prestare attenzione a non danneggiare il tampone di riferimento grigio durante la pulizia e accertarsi che sia completamente pulito e asciutto prima di leggere una striscia di analisi.

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore IDEXX VetLab UA, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore IDEXX VetLab UA* all'indirizzo [idexx.com/product-info](https://www.idexx.com/product-info).



Analizzatore per elettroliti ed emogas IDEXX VetStat*

Registro QC/Manutenzione

L'analizzatore VetStat esegue un controllo automatico ogni volta che viene attivato, quando si esegue un test e allo svolgimento di un controllo qualità elettronico, quotidianamente.

Mensile: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giornaliera	Analizzare una cassetta standard di riferimento alternando i livelli.																															
Settimanale	Pulire la camera di misurazione del campione.																															

Annuale: _____

Frequenza	Manutenzione necessaria	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Mensile	Eseguire il controllo di qualità OPTI* CHECK o OPTI* CHECK PLUS (alternare i livelli).												
Trimestrale	Analizzare una cassetta di calibrazione con l'emoglobina (HbCC) e reinstallare le cassette standard di riferimento.												
Annuale	Sostituire la cartuccia della pompa peristaltica.												
	Sostituire l'apertura I/O per i gas.												

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'analizzatore VetStat, consultare il *manuale d'uso dell'analizzatore per elettroliti ed emogas VetStat* all'indirizzo [idexx.com/product-info](https://www.idexx.com/product-info).



© 2024 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 06-0003545-05
* Catalyst Dx, Catalyst, Catalyst One, Coag Dx, IDEXX Digital Cytology, IDEXX inVue Dx, LaserCyte, ProCyte Dx, ProCyte One, IDEXX SmartQC, SediVue Dx, SmartQC, SNAP, SNAP Pro, SNAPshot Dx, IDEXX VetLab, IDEXX VetLab UA, VetStat, e OPTI sono marchi o marchi registrati di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri prodotti, nomi aziendali e loghi sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

