


Test Catalyst Cortisol

Sblocca informazioni interpretative aggiuntive, specifiche dei risultati

Le informazioni interpretative fornite con il test Catalyst™ Cortisol consentono di determinare i passaggi successivi più adatti al paziente. Per ottenere il massimo da queste importanti informazioni, prendere in considerazione le domande proposte e, successivamente, procedere come segue:

- + **Stai eseguendo più test cortisolo sullo stesso paziente?** In tal caso e qualora sia già stato eseguito un test iniziale per il cortisolo, seguire le istruzioni riportate alla voce **"per ulteriori test..."** per accertarsi che ogni risultato quantitativo sia raggruppato in sequenza, nonché per accedere alle **informazioni interpretative complete**.
- + **Sono state inserite le informazioni del protocollo?** Per ricevere informazioni interpretative specifiche, è necessario selezionare l'apposito protocollo e la relativa fase per l'analisi del paziente. Assicurarsi di seguire il flusso di lavoro specifico dell'analizzatore riportato di seguito:

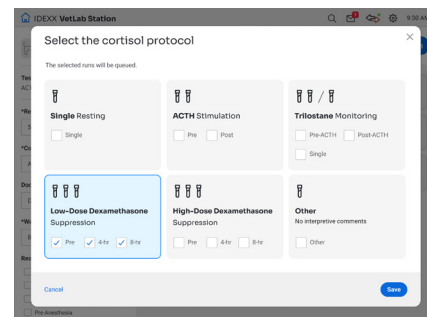

Per test del cortisolo iniziali

Analizzatore biochimico Catalyst One™



Avviare l'analisi sulla IDEXX VetLab™ Station. Nella schermata "Seleziona strumenti", toccare l'icona **Catalyst One** e successivamente **Cortisolo**. Selezionare il protocollo desiderato e le relative fasi aggiuntive, toccare su **Salva**, quindi **Esegui**.

Per test aggiuntivi/analisi a più fasi del cortisolo

Tutte le fasi del protocollo selezionate al momento dell'elaborazione del test iniziale sono visibili nell'elenco "In corso" della schermata iniziale della IDEXX VetLab Station. Quando è il momento di elaborare il campione successivo, toccare il primo il test successivo disponibile nell'elenco, quindi toccare **In coda** e infine **Avvia analisi**.

Analizzatore biochimico Catalyst Dx™



Avviare il test sulla IDEXX VetLab Station come di consueto. Al termine dell'esecuzione, quando richiesto, identificare il protocollo e la rispettiva fase, quindi toccare **Invia**.

Nota: Se si sceglie di inserire il protocollo o la fase del protocollo in un secondo momento, selezionare il paziente nell'elenco "In Corso", successivamente **Aggiungi Dettagli** e infine selezionare le informazioni del protocollo del paziente.

Per assicurarsi che i risultati aggiuntivi siano raggruppati con il risultato iniziale e per ricevere informazioni interpretative:

1. Individuare il risultato iniziale del cortisolo del paziente sulla IDEXX VetLab Station **OPPURE** selezionare il paziente in questione dall'elenco "In attesa" della schermata principale.
2. Toccare **Aggiungi test** e successivamente **Inserisci risultati**.
3. Sulla schermata "Seleziona Strumenti", selezionare **Catalyst Dx**.
4. Quando richiesto al termine dell'esecuzione, selezionare le informazioni del protocollo dell'esecuzione e toccare **Invia**.

IMPORTANTE: Se si dispone di un analizzatore Catalyst One e di un analizzatore Catalyst Dx e si intende monitorare il grafico dei risultati del cortisolo di un paziente nel tempo e/o eseguire test aggiuntivi/analisi a più fasi del cortisolo, IDEXX consiglia di eseguire tutti i test del cortisolo sullo stesso analizzatore con lo stesso tipo di campione.

Per visualizzare i risultati quantitativi e le informazioni interpretative

Toccare sul messaggio nell'angolo in basso a sinistra della IDEXX VetLab Station, che indica che i risultati del paziente sono pronti. Quando vengono aggiunti altri test nell'ambito dell'analisi del cortisolo a più fasi, i risultati vengono riportati dal test aggiuntivo più recente (in alto) al test iniziale (in basso). Le informazioni interpretative complete vengono visualizzate con i risultati più recenti.