

Valuta le correlazioni tra gli esami

con l'esame completo delle urine



Esame completo delle urine: parte integrante del Minimum Data Base

Un esame completo delle urine fornisce informazioni fondamentali nel Minimum Data Base. Mette in evidenza le correlazioni tra i risultati, fornendo una visione d'insieme di tutti gli apparati.


Un esame completo delle urine consente di valutare la salute di reni, alte e basse vie urinarie e di molti altri apparati che, in alcuni casi, non è possibile valutare eseguendo altri test.

L'esame delle urine fornisce informazioni essenziali riguardo a:

- Stato di idratazione
- Nefropatie
- Diabete mellito
- Epatopatie
- Equilibrio acido-base
- Anemia
- Infiammazione
- Patologie emolitiche


Eseguendo solo emocromo / profilo biochimico / profilo elettrolitico si rischia di perdere informazioni relative a:

- Nefropatie o epatopatie
- Infezioni delle vie urinarie
- Gravità del diabete
- Carcinoma della vescica
- Alterazioni dell'equilibrio acido-base

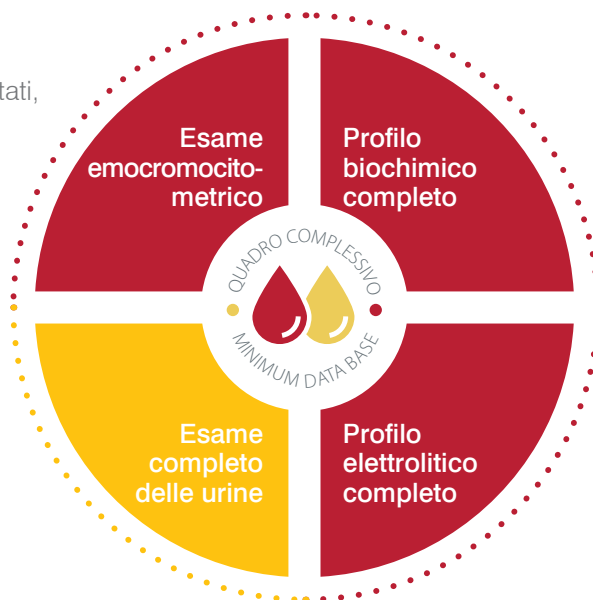

Esegui le tre fasi dell'esame completo delle urine per ottenere un quadro complessivo dello stato di salute dei tuoi pazienti

In genere l'esame delle urine è tra i meno frequentemente eseguiti tra i test del Minimum Data Base e, se fatto, è spesso incompleto poiché consiste solamente nell'uso di un dipstick. L'esame completo delle urine si compone di tre fasi, ugualmente importanti:

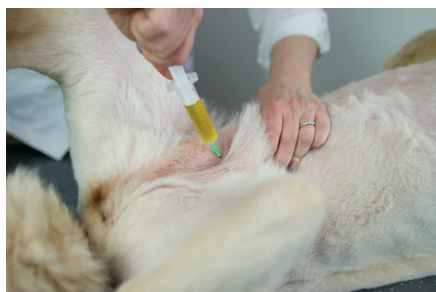

- **Esame fisico:** colore, limpidezza, peso specifico delle urine (USG)
- **Esame chimico:** pH, proteine, glucosio, corpi chetonici, urobilinogeno, bilirubina, leucociti ed emoglobina/sangue
- **Esame del sedimento urinario:** cellule, batteri, cilindri, cristalli e altri elementi

Al fine di garantire risultati accurati, la valutazione del campione deve essere eseguita entro 30-60 minuti dalla raccolta.

Grazie a IDEXX è ora possibile effettuare agevolmente l'esame completo delle urine in ambulatorio con una precisione senza precedenti. Nel lasso di tempo di una visita clinica.

Maggiori informazioni disponibili sul sito
www.idexx.eu/minimum-database

Soluzioni complete

IDEXX
LABORATORIES



Valuta le correlazioni tra gli esami con l'esame completo delle urine

Velocizza il flusso di lavoro per l'esame completo delle urine

Esegui le tre fasi dell'esame completo delle urine direttamente in ambulatorio, con una rapidità e un'accuratezza senza precedenti grazie a IDEXX.

in **soli 3 minuti** con IDEXX



Esame del sedimento urinario
con SediVue Dx

3 min.



Pipettare 165 μ L di urine




Depositare il campione



Premere il pulsante Start e attendere

Esame chimico con l'analizzatore VetLab UA

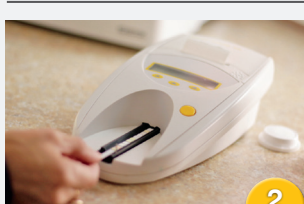

- Depositare il campione di urine sulla striscia reattiva IDEXX UA™.
- Inserire la striscia nell'analizzatore IDEXX VetLab® UA™.
- Premere il pulsante Start; i risultati sono disponibili in circa 80 secondi

2 min.

Esame fisico eseguito come di consueto



Inserire i reperti dell'esame fisico nella stazione IDEXX VetLab®

1 min.

In caso di sospetta infezione batterica, l'urinocoltura e il test di sensibilità IDEXX, rapidi e accurati, eseguiti presso i laboratori di riferimento IDEXX, consentono di identificare con certezza la causa sottostante dell'infezione e un trattamento efficace.

L'esito dell'esame completo delle urine in un solo referto integrato


- Risultati in 3 minuti
- Tutte le informazioni contenute in un referto completo, comprensivo di immagini da esaminare e condividere con il proprietario dell'animale, sul rapporto IVLS cartaceo o su VetConnect® PLUS

Test	Results	Reference Interval	LOW	NORMAL	HIGH
Client: Bond, James (3899)					
Gender: Female/Spayed					
Weight: 44.4					
Age: 9 Years					
Doctor: Frost					
Main Street Animal Hospital					
14 Cedar Ave.					
York, MA 06375					
888-555-1234					
UA Analyzer (September 17, 2015 2:09 pm)					
Collection	Cystocentesis				
Color	pale yellow				
Clarity	Clear				
SG	1.028				
pH	5				
PRO	1+				
GLU	Negative				
KET	Negative				
BLD	Negative				
BIL	Negative				
UBG	Negative				
LEU	Negative				
SediVue Dx (September 17, 2015 2:09 pm)					
WBC	None to rare				
RBC	None to rare				
Epithelial Cells	None to rare				
Squamous	None to rare				
Non-squamous	None to rare				
Cast	None to rare				
Hyaline	1 - 2/LPF				
Non-hyaline	None to rare				
Crystals	None to rare				
Unclassified	None to rare				
CaOx Di	None to rare				
Struvite	1 - 5 /HPF				

Esame fisico (manuale)


Esame chimico (automatica)

Esame del sedimento urinario (automatica)

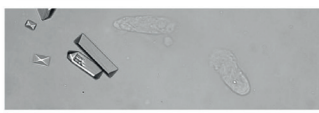

Letture dell'esito

Visualizzazione dei risultati integrati completi in formato cartaceo, nel software gestionale dell'ambulatorio o in IDEXX VetConnect® PLUS, e possibilità di condividere referto e indicazioni direttamente con i clienti

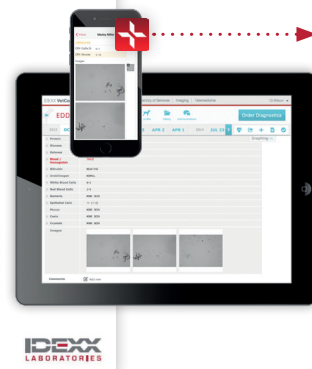

IDEXX VetConnect® PLUS

Tutti gli analizzatori IDEXX sono completamente integrati con VetConnect® PLUS, consentendo così ai veterinari di individuare agevolmente le tendenze nei risultati dei test dei pazienti e di accedere rapidamente ai dati in tempo reale, anche quando non sono in ambulatorio.