

Pulizia dell'analizzatore SNAP Pro*

Pulizia dei componenti interni (eseguire settimanalmente o secondo necessità)



1. Spegner l'analizzatore e scollegare il cavo di alimentazione e/o quello di Ethernet.




2. Sulla base dell'analizzatore spento, utilizzare un cacciavite a punta piatta o una moneta per girare di un quarto di giro, in senso antiorario, i 2 elementi di fissaggio color argento.



3. Rimuovere la base dall'analizzatore.



4. Pulire l'**intera** base con un panno che non lascia pelucchi o con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool isopropilico al 70%, sapone liquido delicato e acqua, o una soluzione al 10% di candeggina.

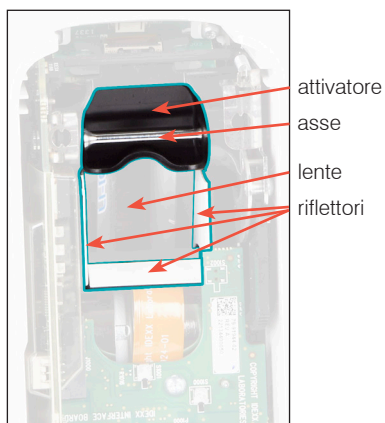

5. Pulire i 3 riflettori bianchi, l'asse e l'attivatore con un panno nuovo che non lascia pelucchi o un batuffolo di cotone imbevuto di alcool isopropilico al 70%, sapone liquido delicato e acqua o una soluzione al 10% di candeggina. **NON pulire la lente.**



6. Una volta fatta asciugare la base, fissarla nuovamente all'analizzatore e accertarsi che sia ben inserita in posizione.



7. Girare gli elementi di fissaggio color argento di un quarto di giro in senso orario per bloccare la base in posizione.



8. Accertarsi che la base e gli elementi di fissaggio color argento siano a filo dell'analizzatore e correttamente inseriti. **Un fissaggio non corretto della base e degli elementi di blocco può influire sulle prestazioni dell'analizzatore.**

Pulizia dell'esterno e dello schermo (eseguire secondo necessità)



Pulire l'involucro e lo schermo con un panno che non lascia pelucchi imbevuto di alcool isopropilico al 70%, sapone liquido delicato e acqua o una soluzione al 10% di candeggina.

NON pulire le aperture sotto il pulsante di accensione o le porte USB/di accensione/Ethernet.

Durante la procedura di pulizia, non far venire l'analizzatore a contatto con:

- ~~X~~ solventi organici
- ~~X~~ prodotti per la pulizia a base di ammoniaca
- ~~X~~ pennarelli/evidenziatori
- ~~X~~ spray contenenti liquidi volatili
- ~~X~~ insetticidi
- ~~X~~ disinfettanti
- ~~X~~ lucidanti
- ~~X~~ deodoranti per ambienti