

SNAP Pro Analyzer

Lo SNAP Pro* Analyzer è uno strumento di automazione per test su animali domestici che invia risultati al registro medico elettronico del paziente, risparmiando tempo e denaro. Quando lo SNAP Pro è stato introdotto, avete ottenuto i benefici dell'automazione ma dovevate comunque inserire manualmente i risultati dei test SNAP*. Con la nuova caratteristica ProRead* sullo SNAP Pro* Analyzer, i risultati dei test SNAP vengono letti automaticamente, facendo risparmiare una fase del flusso di lavoro SNAP e rendendo il vostro SNAP PRO ancora più prezioso.

Visualizzare i risultati ProRead

Eseguite il vostro test SNAP usando il flusso di lavoro che preferite. Una volta completata l'analisi, noterete che lo schermo dei Risultati è simile a come appariva senza la caratteristica ProRead. La differenza è che ora i risultati vi vengono forniti, non dovrete più leggere la finestra dei risultati e inserire ciascun risultato positivo o negativo.

Oltre ai risultati automatici, il colore dell'indicatore di stato sull'analizzatore varierà in base ai risultati. Se l'indicatore di stato è:

- **Verde:** tutti i risultati sono negativi.
- **Blu:** almeno un risultato è positivo.
- **Giallo:** il risultato potrebbe aver bisogno di essere verificato a causa di macchie molto chiare o uno sviluppo del colore inatteso (come detriti o una tinta blu) nella finestra dei risultati. Se siete d'accordo con i risultati mostrati, selezionare il **segno di spunta** ✓ per salvare il risultato. Altrimenti, selezionare l'icona del risultato appropriata e quindi selezionare il **segno di spunta** ✓. Per annullare il test e tornare alla schermata iniziale, selezionate l'icona di chiusura ✕.

Stato **verde** =
tutti i risultati sono
negativi.

Stato **blu** =
Almeno un risultato è
positivo.

Stato **giallo** =
Richiede l'interazione
dell'utente per completare
l'esecuzione.



Serve aiuto?
Contattate l'**Assistenza
Tecnica IDEXX** al
39 02 87 10 36 76.